

### **Précautions avant de porter un masque N95**

- Afin de garder une étanchéité complète sur la peau, la barbe doit être rasée.
- Les cheveux longs doivent être attachés.
- Se laver les mains avant de mettre le masque afin de ne pas le contaminer.

### **Vérifier le masque :**

- Le masque n'est pas endommagé ou pollué.
- Les attaches de tête ne sont pas endommagées et ont une bonne élasticité.
- La bande de nez n'est pas endommagée.

### **Mettre le masque :**

- Mettez le masque ouvert dans la paume de votre main, l'intérieur vers le haut.
- Mettez le masque sur le nez, la bouche et le menton avec 1 main.
- L'autre main met l'attache inférieure derrière le cou.
- Puis, mettez l'attache supérieure derrière la tête. Placez-la au-dessus des oreilles.
- Avec les deux mains, ajuster la bande de nez aux formes du nez.
- Assurez-vous que le masque et le visage sont bien en contact.
- **Attention** : Ne pas ajuster le nez avec une seule main

### **Test d'étanchéité :**

Recouvrez le masque avec les 2 paumes des mains. Inspirez et expirez. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de fuite d'air sur les bords, entre le masque et le visage.


Si vous n'arrivez pas à avoir une bonne étanchéité, veuillez remplacer le masque par une autre grandeur ou un autre modèle.

### **Avertissements :**

- Ne pas utiliser dans des atmosphères contenant moins de 19,5% d'oxygène.
- Ne pas utiliser dans des atmosphères présentant un danger immédiat pour la vie ou la santé.
- Ne dépassez pas les concentrations d'utilisation maximales établies par les normes réglementaires. Ne pas utiliser et entretenir correctement ce produit peut entraîner des blessures ou la mort.
- Tous les respirateurs approuvés doivent être sélectionnés, ajustés, utilisés et entretenus conformément aux normes OSHA, CSA et autres réglementations applicables.
- Ne jamais remplacer, modifier, ajouter ou omettre des pièces. N'utilisez que des pièces de rechange exactes dans la configuration spécifiée par le fabricant.
- Le respirateur aide à protéger contre certains contaminants particuliers mais n'élimine pas l'exposition ou le risques de contracter une maladie ou une infection.



HOLD THE MASK IN YOUR HAND AND PLACE IT ON NOSE, MOUTH AND CHIN

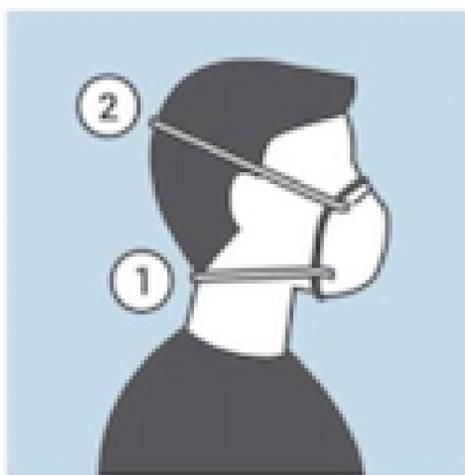

FIRST POSITION THE BOTTOM STRAP UNDER YOUR EARS AND THEN THE TOP STRAP AT THE BACK OF YOUR HEAD



PRESS THE METALLIC WIRE TO FIT THE SHAPE OF YOUR NOSE AND FACE



PERFORM A FIT CHECK: PLACE HANDS OVER THE RESPIRATOR AND EXHALE, ADJUST IF THERE ARE LEAKS