



TeWa : Le futur de l'acupuncture

Voici une technologie révolutionnaire en matière de guidage – le tube Safe-T Sleeve^{MC}


Comment utiliser le tube Safe-T Sleeve^{MC}

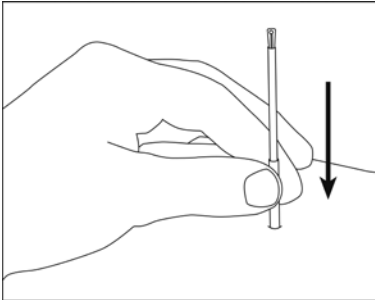


ÉTAPE UN : Retirez la languette de plastique et glissez le Safe-T Sleeve^{MC} vers le bas pour qu'il soit de niveau avec l'extrémité inférieure du tube d'insertion.

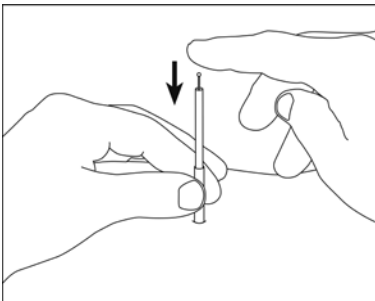

ÉTAPE DEUX : Insérez l'aiguille dans le point d'acupuncture comme d'habitude.

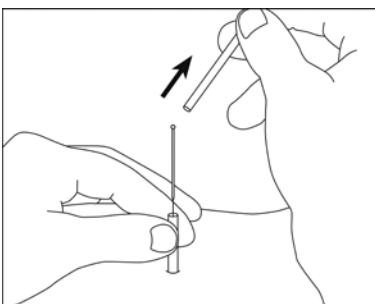

ÉTAPE TROIS : Tout en tenant le Safe-T Sleeve^{MC} en place, retirez le tube d'insertion avec l'autre main.

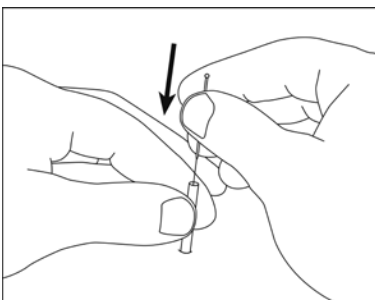

ÉTAPE QUATRE : Guidez l'aiguille à la profondeur cible tout en soutenant la tige de l'aiguille avec le tube Safe-T Sleeve^{MC}. Le Safe-T Sleeve^{MC} peut ensuite être retiré ou laissé en place.



Offert exclusivement sur les aiguilles TeWa, le tube jetable Safe-T Sleeve^{MC} assure une insertion nette et précise à chaque fois.

Le Safe-T Sleeve^{MC} a été créé pour résoudre les problèmes associés à l'insertion d'aiguilles plus longues dans des tissus denses ou serrés – notamment la possibilité que l'aiguille se plie et la difficulté à stabiliser la tige.

Vous pouvez maintenant utiliser le tube Safe-T Sleeve^{MC} pour vous aider à compléter l'insertion jusqu'à la profondeur cible, le tout sans compromettre la stérilité de la tige de l'aiguille.

Le système flexible de guidage par tube en deux parties est idéal pour l'acupuncture sportive, le travail sur les points moteurs et d'autres techniques avancées d'acupuncture.

Le tube Safe-T Sleeve^{MC} est offert exclusivement sur les aiguilles TeWa (« Té-Va ») avec ou sans revêtement d'une longueur de 40 mm (1,5 po) ou plus.

Consultez le site www.safe-t-sleeve.com pour des vidéos d'information démontrant l'utilisation du tube Safe-T Sleeve^{MC} et ses emplois dans les techniques générales, l'acupuncture sportive et d'autres techniques spécialisées!

◁ Une aiguille TeWa avec le tube d'insertion retiré et le tube Safe-T Sleeve^{MC} en place.



Safe-T SleeveTM
PATENT PENDING

DISTRIBUÉ PAR


MTM
Médical Tronik

190, Boul. St-Elzéar Ouest
Laval (Québec) H7L 3N3
T 450 669.8985 | 1 800 361.0877
F 450 669.9532 | 1 888 935.7001

www.medicaltronik.ca

TeWa : Un nouveau standard clinique

Vous recherchez une aiguille abordable qui est douce, effilée et polyvalente? Ne cherchez plus! Les nouvelles aiguilles TeWa vous offrent :

- Poignées à fil de cuivre enroulé
- Pointes d'aiguilles aiguisées à la machine, assurant une géométrie parfaite de pointe
- Aiguilles offertes avec revêtement de tige pour une insertion toute en douceur (aiguilles sans revêtement également offertes)
- Caractéristiques améliorées : Le tube Safe-T Sleeve^{MC} est offert de façon standard sur toutes les aiguilles de 40 mm et plus – vous pouvez l'utiliser en fonction de vos besoins!



Aiguilles TeWa avec revêtement

Code	Description
TWCJ1615	TeWa avec revêtement 0,16 x 15 mm (40 - 0,6 po)
TWCJ1630	TeWa avec revêtement 0,16 x 30 mm (40 - 1,2 po)
TWCJ1815	TeWa avec revêtement 0,18 x 15 mm (38 - 0,6 po)
TWCJ1830	TeWa avec revêtement 0,18 x 30 mm (38 x 1,2 po)
TWCJ1840	TeWa avec revêtement 0,18 x 40 mm (38 - 1,5 po) avec Safe-T Sleeve ^{MC}
TWCJ2015	TeWa avec revêtement 0,20 x 15 mm (36 - 0,6 po)
TWCJ2030	TeWa avec revêtement 0,20 x 30 mm (36 - 1,2 po)
TWCJ2040	TeWa avec revêtement 0,20 x 40 mm (36 - 1,5 po) avec Safe-T Sleeve ^{MC}
TWCJ2050	TeWa avec revêtement 0,20 x 50 mm (36 - 2,0 po) avec Safe-T Sleeve ^{MC}
TWCJ2213	TeWa avec revêtement 0,22 x 13 mm (34 - 0,5 po)
TWCJ2225	TeWa avec revêtement 0,22 x 25 mm (34 - 1,0 po)
TWCJ2240	TeWa avec revêtement 0,22 x 40 mm (34 - 1,5 po) avec Safe-T Sleeve ^{MC}
TWCJ2250	TeWa avec revêtement 0,22 x 50 mm (34 - 2,0 po) avec Safe-T Sleeve ^{MC}
TWCJ2275	TeWa avec revêtement 0,22 x 75 mm (34 - 3,0 po) avec Safe-T Sleeve ^{MC}
TWCJ2515	TeWa avec revêtement 0,25 x 15 mm (32 - 0,6 po)
TWCJ2525	TeWa avec revêtement 0,25 x 25 mm (32 - 1,0 po)
TWCJ2530	TeWa avec revêtement 0,25 x 30 mm (32 - 1,2 po)
TWCJ2540	TeWa avec revêtement 0,25 x 40 mm (32 - 1,5 po) avec Safe-T Sleeve ^{MC}
TWCJ2550	TeWa avec revêtement 0,25 x 50 mm (32 - 2,0 po) avec Safe-T Sleeve ^{MC}
TWCJ2575	TeWa avec revêtement 0,25 x 75 mm (32 - 3,0 po) avec Safe-T Sleeve ^{MC}
TWCJ3015	TeWa avec revêtement 0,30 x 15 mm (30 - 0,6 po)
TWCJ3025	TeWa avec revêtement 0,30 x 25 mm (30 - 1,0 po)
TWCJ3040	TeWa avec revêtement 0,30 x 40 mm (30 - 1,5 po) avec Safe-T Sleeve ^{MC}
TWCJ3050	TeWa avec revêtement 0,30 x 50 mm (30 - 2,0 po) avec Safe-T Sleeve ^{MC}
TWCJ3075	TeWa avec revêtement 0,30 x 75 mm (30 - 3,0 po) avec Safe-T Sleeve ^{MC}
TWCJ30100	TeWa avec revêtement 0,30 x 100 mm (30 - 4,0 po) avec Safe-T Sleeve ^{MC}
TWCJ3575	TeWa avec revêtement 0,35 x 75 mm (28 - 3,0 po) avec Safe-T Sleeve ^{MC}
TWCJ35100	TeWa avec revêtement 0,35 x 100 mm (28 - 4,0 po) avec Safe-T Sleeve ^{MC}

Aiguilles TeWa sans revêtement

Code	Description
TWNJ1630	TeWa sans revêtement 0,16 x 30 mm (40 - 1,2 po)
TWNJ2013	TeWa sans revêtement 0,20 x 13 mm (36 - 0,5 po)
TWNJ2025	TeWa sans revêtement 0,20 x 25 mm (36 - 1,0 po)
TWNJ2040	TeWa sans revêtement 0,20 x 40 mm (36 - 1,5 po) avec Safe-T Sleeve ^{MC}
TWNJ2050	TeWa sans revêtement 0,20 x 50 mm (36 - 2,0 po) avec Safe-T Sleeve ^{MC}
TWNJ2213	TeWa sans revêtement 0,22 x 13 mm (34 - 0,5 po)
TWNJ2225	TeWa sans revêtement 0,22 x 25 mm (34 - 1,0 po)
TWNJ2240	TeWa sans revêtement 0,22 x 40 mm (34 - 1,5 po) avec Safe-T Sleeve ^{MC}
TWNJ2250	TeWa sans revêtement 0,22 x 50 mm (34 - 2,0 po) avec Safe-T Sleeve ^{MC}
TWNJ2275	TeWa sans revêtement 0,22 x 75 mm (34 - 3,0 po) avec Safe-T Sleeve ^{MC}
TWNJ2513	TeWa sans revêtement 0,25 x 13 mm (32 - 0,5 po)
TWNJ2525	TeWa sans revêtement 0,25 x 25 mm (32 - 1,0 po)
TWNJ2540	TeWa sans revêtement 0,25 x 40 mm (32 - 1,5 po) avec Safe-T Sleeve ^{MC}
TWNJ2550	TeWa sans revêtement 0,25 x 50 mm (32 - 2,0 po) avec Safe-T Sleeve ^{MC}
TWNJ2575	TeWa sans revêtement 0,25 x 75 mm (32 - 3,0 po) avec Safe-T Sleeve ^{MC}
TWNJ3013	TeWa sans revêtement 0,30 x 13 mm (30 - 0,5 po)
TWNJ3025	TeWa sans revêtement 0,30 x 25 mm (30 - 1,0 po)
TWNJ3040	TeWa sans revêtement 0,30 x 40 mm (30 - 1,5 po) avec Safe-T Sleeve ^{MC}
TWNJ3050	TeWa sans revêtement 0,30 x 50 mm (30 - 2,0 po) avec Safe-T Sleeve ^{MC}
TWNJ3075	TeWa sans revêtement 0,30 x 75 mm (30 - 3,0 po) avec Safe-T Sleeve ^{MC}
TWNJ30100	TeWa sans revêtement 0,30 x 100 mm (30 - 4,0 po) avec Safe-T Sleeve ^{MC}
TWNJ3575	TeWa sans revêtement 0,35 x 75 mm (28 - 3,0 po) avec Safe-T Sleeve ^{MC}
TWNJ35100	TeWa sans revêtement 0,35 x 100 mm (28 - 4,0 po) avec Safe-T Sleeve ^{MC}

DISTRIBUÉ PAR



190, Boul. St-Elzéar Ouest
Laval (Québec) H7L 3N3
T 450 669.8985 | 1 800 361.0877
F 450 669.9532 | 1 888 935.7001

www.medicaltronik.ca